

PARI SINUS

Contra Sinusitis



De **PARI SINUS**, een nieuwe ontwikkeling in inhalatie apparaten

- pulserend aërosol voor neus en neusbijholten
- in het bijzonder bij sinusitis, rhinosinusitis en sinubronchitis



Specialisten in effectieve inhalatie



PARI SINUS

Pulserend aërosol voor de neusbijholten

Bij de behandeling van sinusitis, rhinosinusitis en sinubronchitis is de inhalatietherapie van cruciaal belang. Naast de bekende voordelen van aërosoltherapie zorgt de **PARI SINUS**, dankzij het positieve effect van een alternerende drukgolf, ervoor dat de aërosolen direct in de neusbijholten worden afgezet. Vibrerende aërosolen raken immers veel gemakkelijker via de ostiën in de neusbijholten dan gewone aërosolen, en brengen de medicijnen direct naar de plaats waar zij het effectiefst zijn.



PARI SINUS
met PARI LC SINUS vernevelaar,
bestelnr. 028G1000

Kenmerken van het aërosol:

TOR (Total Output Rate)	170 mg/min
MMD (mediaangemiddelde massadiameter)	3,6 μm
Massa-aandeel onder 5 μm	65 %

Meting met Malvern Master Sizer X bij 23°C oC en relatieve vochtigheidsgraad van 50%. Vernevelingsmiddel: 0,9% NaCl (5ml). Jet flow 4,6 l/min

Indicaties:

Bij aandoeningen van de luchtwegen, bijv.

- acute en chronische sinusitiden (allergisch, viraal, bacterieel)
- rhinosinusitis
- sinubronchitis

Substanties die voor de inhalatietherapie met **PARI SINUS** gebruikt kunnen worden:

- zoutoplossingen, bijv. fysiologische of hypertone NaCl-oplossing
- pekelwateroplossingen
- secretolytische en mucoactieve substanties
- antibiotica
- corticosteroiden

Naast het afzetten van geneeskrachtige substanties op de gewenste plaatsen, biedt de vochtinhalatie bijkomende voordelen voor de betrokken gebieden:

- bevochtiging van het slijmvlies van neus en neusbijholten
- regeneratie van het trilhaarepithel, verbetering van de mucociliaire clearance

PARI SINUS

Belangrijkste kenmerken:

- ter behandeling van sinusitis, rhinosinusitis en sinubronchitis
- behoedzame, pijnloze niet-invasieve behandeling
- rechtstreeks bereiken van de neusbijholten middels pulserend aërosol

Overtuig u zelf van de kwaliteit van onze producten!

PARI Service Center:

0049 (0) 8151 279-279

www.pari.de, E-Mail: info@pari.de

PARI Klantenservice

Als U vragen heeft over het gebruik, toepassing, reiniging of onderhoud van uw PARI apparaat, vernevelaar of toebehoren kunt U zich wenden tot uw leverancier of de vertegenwoordiging van uw land.

Area Sales Manager Benelux:

Jan Rycken

Drève des Chasseurs, 153

1410 Waterloo/Belgium

Tel.: +32 (02) 354 51 30

Fax: +32 (02) 353 03 82

Mobile: +32 (0476) 28 72 33

e-mail: j_rycken@pari.de

dealer



PARI GmbH

Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg

Telefon +49 (0) 8151 279-0

Fax +49 (0) 8151 279-101



U vindt **PARI** op het internet:

www.pari.de

E-Mail: info@pari.de

Specialisten in effectieve inhalatie

